

VOR DER PROBENAHEME:

- ▶ Entfernung der supragingivalen Plaque und Trockenlegung der Entnahmestelle (keine professionelle Zahnreinigung).


Bitte beachten Sie:

- ▶ Starke Blutungen und/oder Pusentleerung sowie Probenahmen kurz nach einer Parodontalbehandlung können das Analyseergebnis verfälschen.
- ▶ Die subgingivale Mikroflora benötigt nach Antibiotikagabe mindestens 6 Wochen um sich zu stabilisieren.
- ▶ Die Verwendung antibakterieller Mundspüllösungen unmittelbar vor der Probenahme kann zu einem verfälschten Analyseergebnis führen.

AUFTRAG ONLINE


- ▶ Digitaler Prozess
- ▶ Auftragskopie per E-Mail

www.iai-test.de/auftrag

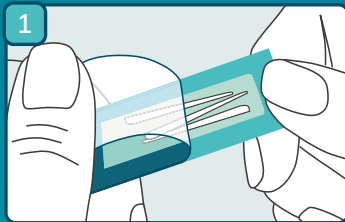


1. Vorbereitung

Nehmen Sie die Papierspitzen zur Hand und wählen Sie die Entnahmestelle für die Probe. Die Entnahme muss grundsätzlich mit **genau 2 Papierspitzen aus der tiefsten Tasche** des Parodonts erfolgen.*

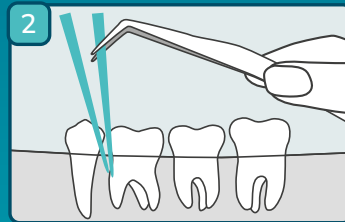


2. Probennahme

2 Papierspitzen mittels steriler Pinzette in die Zahnfleischtasche bis zum Taschengrund einführen, 10-15 Sekunden dort belassen und in das mitgelieferte Röhrchen überführen.

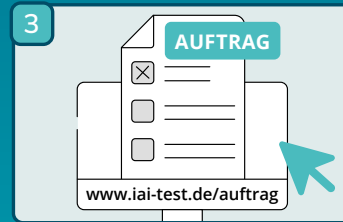

3. Auftrag

Auftragsformular online ausfüllen, Papierform optional; Testnummer in Unterlagen notieren. Tipp: Chargenetikett auf der Rückseite der Testbox fotografieren.

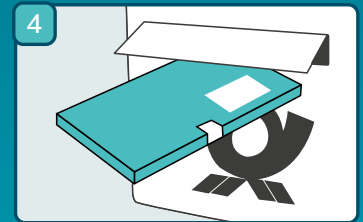

4. Versand

Probe und ggf. Auftragsformular im **PadoBiom®** Probenahme-Set portofrei einsenden und das Ergebnis online (nach Registrierung) sowie per Briefpost/E-Mail (wenn gewünscht) erhalten.

***Hinweis: Analyse nur bei Einsendung von genau 2 Papierspitzen möglich.**

INHALT

Auftragsformular | Röhrchen | Set Papierspitzen | Sicherheitssiegel | Anleitung

PadoBiom®