

ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI

www.iai-test.de



Rev2_VZ026-05

PRIMA DEL PRELIEVO DEI CAMPIONI

- ▶ Rimuovere la placca sopragengivale e asciugare il sito di prelievo (non effettuare la pulizia dentale professionale prima di prelevare i campioni).

Si prega di tener presente quanto segue:

- ▶ Il sanguinamento abbondante e/o la secrezione di pus come pure il prelievo dei campioni effettuato poco dopo un trattamento parodontale possono falsare i risultati dell'analisi.
- ▶ Dopo un trattamento antibiotico, occorre attendere almeno 6 settimane affinché la microflora subgengivale torni a ripristinarsi.
- ▶ L'uso di collutori antibatterici immediatamente prima del prelievo dei campioni può falsare i risultati dell'analisi.

ORDINE ONLINE


- ▶ procedura digitale
- ▶ copia dell'ordine via e-mail

www.iai-test.de/ordine



1. Preparazione

Prendere i coni di carta e scegliere il sito di prelievo dei campioni. Il prelievo deve sempre essere effettuato inserendo **2 coni di carta (né più né meno) nella tasca parodontale più profonda.***

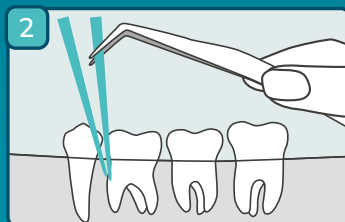

2. Prelievo dei campioni


Inserire 2 coni di carta fino al fondo della tasca gengivale utilizzando una pinzetta sterile, mantenerli posizionati per 10-15 secondi e quindi riporli nella provetta fornita nel kit.

N.B.: l'analisi potrà essere effettuata soltanto se vengono inviati esattamente 2 coni di carta.



3. Ordine

Compilare il modulo d'ordine online (la versione cartacea è facoltativa) e prendere nota del numero del test per la propria documentazione. Consiglio: fotografare l'etichetta del lotto apposta sul retro della confezione del test.

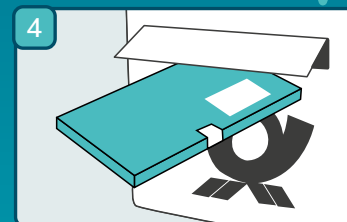

4. Spedizione

Inserire i campioni e, solo se non compilato online, il modulo d'ordine cartaceo nella confezione di PadoBiom® e spedirla al laboratorio a carico del destinatario. I risultati verranno visualizzati online (dopo la registrazione) oppure verranno inviati per posta/e-mail (se richiesto).

CONTENUTO

modulo d'ordine | provetta | set di coni di carta | sigillo di sicurezza | istruzioni per il prelievo dei campioni

PadoBiom®