

KRÓTKA INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK



Szczegółowe instrukcje
użytkowania
dostępne na stronie
www.iai-test.de
dostępne.

PRZED POBRANIEM PRÓBK:

- ▶ Usunięcie naddziąsłowej płytki nazębnej i opróżnienie miejsca pobrania próbki (bez profesjonalnego czyszczenia zębów)
- ▶ Należy pamiętać, że obfite krwawienie i/lub opróżnienie ropne może zafałszować wynik analizy.
- ▶ Należy unikać stosowania antybakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej bezpośrednio przed pobraniem próbki.

ZAWARTOŚĆ

1 × formularz zlecenia	1 × plomba zabezpieczająca
1 × probówka	1 × instrukcja
1 × zestaw papierowych końcówek	

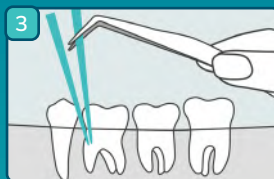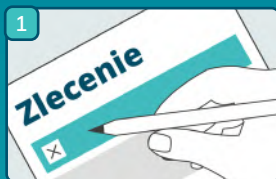

1. Formularz zlecenia

Wszystkie pola formularza zamówienia należy czytelnie wypełnić długopisem. Zanotuj numer testu zamówienia w swoich dokumentach.

2. Przygotowanie

Weź papierowe końcówki i wybierz punkt pobrania próbki. Próbka musi być zawsze pobrana z **dokładnie 2 punktów papierowych z najgłębszej kieszonki** przyzębnej.*

* Uwaga: Analiza jest możliwa tylko w przypadku przesłania **dokładnie 2 papierowych końcówek**

3. Pobieranie próbek

Używając sterylnych kleszczyków, włóż 2 papierowe końcówki na raz do kieszonki dziąsłowej aż do podstawy kieszonki, pozostaw je tam na 10-15 sekund i przenieś je do dostarczonej probówki.

4. Podsumowanie

Zanotuj miejsce pobrania próbki i szczegóły kliniczne w formularzu zamówienia.

5. Wysyłka

Wyślij próbkę i formularz zamówienia w zestawie do pobierania próbek PadoBiom® opłaconą przesyłką pocztową i otrzymaj wynik online (po rejestracji) lub pocztą (jeśli chcesz).