



# ANLEITUNG ZUR PROBENGEWINNUNG

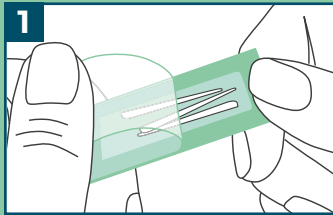


## 1. VORBEREITUNG

Nehmen Sie die Papierspitzen zur Hand und wählen Sie die Entnahmestelle(n) für die Proben.

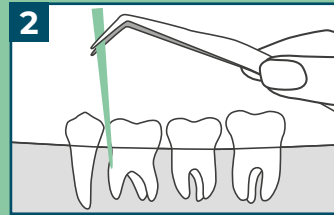


## 2. PROBENAHME

Papierspitze jeweils mittels steriler Pinzette in die Zahnfleischtasche bis zum Taschenrand einführen und 10-15 Sekunden dort belassen.

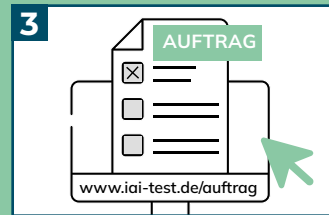

## 3. AUFTRAG

Auftragsformular online ausfüllen, Papierform optional; Testnummer in Unterlagen notieren. Tipp: Chargenetikett auf der Rückseite der Testbox fotografieren.

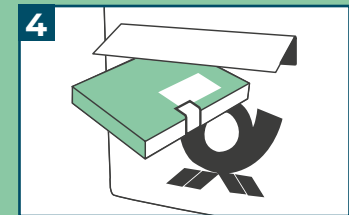

## 4. VERSAND

Proben & ggf. Auftragsformular in der PadoTest® Testbox portofrei einsenden und das Ergebnis online und/oder per Briefpost/ E-Mail erhalten.

## VOR DER PROBENAHME

- ▶ Entfernung der supragingivalen Plaque und Trockenlegung der Entnahmestelle. (Keine professionelle Zahnreinigung)
- ▶ Bitte beachten Sie, dass starke Blutungen und/oder Pusentleerung das Analyseergebnis verfälschen können.
- ▶ Die Verwendung antibakterieller Mundspüllösungen unmittelbar vor der Probenahme sollte vermieden werden.

## 2A. MULTISTELLEN-TEST

Proben von mehreren Zahnfleischtaschen werden in einer Analyse zusammengefasst. Einfach alle benutzten Papierspitzen in ein Röhrchen geben.

## 2B. EINZELSTELLEN-TEST

Separate Analysen von Proben aus bis zu vier verschiedenen Zahnfleischtaschen. Jede Papierspitze kommt in ein gesondertes Röhrchen.

[www.iai-test.de/auftrag](http://www.iai-test.de/auftrag)

## AUFTRAG ONLINE

- ▶ Digitaler Prozess
- ▶ Auswahl von Kontrollanalysen
- ▶ Klinische Angaben auf dem Ergebnisbericht
- ▶ Auftragskopie per E-Mail

## INHALT:

Auftragsformular | Set Papierspitzen | 4× Röhrchen | Sicherheitssiegel | Anleitung