





## 1. PREPARAZIONE

Prendere i coni di carta sterili e scegliere il sito/i siti da cui prelevare il campione/i campioni.

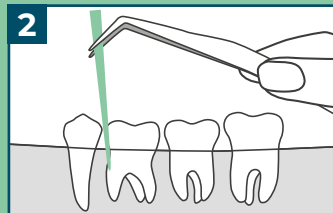

## 2. PRELIEVO DEI CAMPIONI

Inserire un cono di carta fino al fondo della tasca gengivale utilizzando una pinzetta sterile e mantenerlo posizionato per 10-15 secondi.

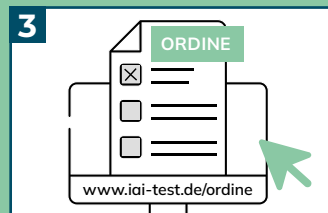

## 3. ORDINE

Compilare il modulo d'ordine online (la versione cartacea è facoltativa) e prendere nota del numero del test per la propria documentazione. Consiglio: fotografare l'etichetta del lotto apposta sul retro della confezione del test.



## 4. SPEDIZIONE

Inserire i campioni e, solo se non compilato online, il modulo d'ordine cartaceo nella confezione di PadoTest® e spedirla al laboratorio a carico del destinatario. I risultati verranno visualizzati online (dopo la registrazione) oppure verranno inviati per posta/e-mail (se richiesto).

## PRIMA DEL PRELIEVO DEI CAMPIONI

- ▶ Rimuovere la placca sopragengivale e asciugare il sito di prelievo (non effettuare la pulizia dentale professionale prima di prelevare i campioni).
- ▶ Il sanguinamento abbondante e/o la secrezione di pus come possono falsare i risultati dell'analisi.
- ▶ Evitare l'uso di collutori antibatterici immediatamente prima del prelievo dei campioni.

## 2A. TEST MULTI-SITE

Campioni prelevati da varie tasche gengivali come parte di una stessa analisi. In questo caso inserire tutte le punte di carta usate in una sola provetta.

## 2B. TEST SINGLE-SITE

Analisi separate di un massimo di 4 campioni di tasche gengivali diverse. In questo caso inserire un solo cono di carta per ogni tasca gengivale in una singola provetta.

[www.iai-test.de/ordine](http://www.iai-test.de/ordine)

## ORDINE ONLINE

- ▶ procedura digitale
- ▶ scelta di analisi di controllo
- ▶ dati clinici nel resoconto dei risultati
- ▶ copia dell'ordine via e-mail

## CONTENUTO:

modulo d'ordine | set di coni di carta | 4 provette | sigillo di sicurezza | istruzioni per il prelievo dei campioni