



INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBK

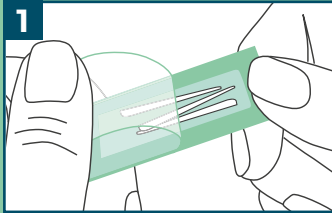


1. PRZYGOTOWANIE

Przygotuj ćwiki papierowe i wybierz miejsce/miejsca pobrania próbek.

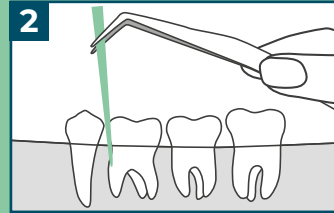


2. POBIERANIE PRÓBK

Za pomocą pęsety wprowadź sterylny ćwik papierowy do dna kieszonki dziąsłowej i pozostaw na około 10-15 sekund.

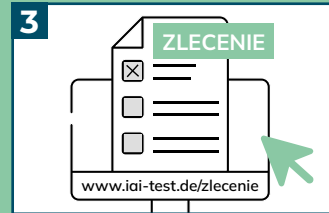

3. ZLECENIE

Formularz zlecenia można wypełnić online; wersja papierowa jest opcjonalna. Zannotuj numer testu w dokumentacji. Wskazówka: Zrób zdjęcie etykiety z numerem serii znajdującej się na tylnej stronie pudełka testowego.

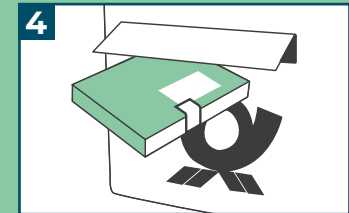

4. WYSYŁKA

Wyślij próbkę oraz (jeśli dotyczy) formularz zlecenia w zestawie do pobierania próbek PadoTest® bezpłatnie. Wynik można otrzymać online i/ lub pocztą tradycyjną/e-mailem.

PRZED POBRANIEM PRÓBK

- ▶ Usunąć nadziąsłową płytkę nazębną i osuszyć miejsce pobrania. (nie wykonywać profesjonalnego czyszczenia zębów)
- ▶ Prosimy pamiętać, że silne krwawienie i/ lub wydzielina ropna mogą zafałszować wynik analizy.
- ▶ Należy unikać stosowania antybakteryjnych płukanek do jamy ustnej bezpośrednio przed pobraniem próbki.

2A. PRÓBKA ZBIORCZA

Próbki z kilku kieszonek dziąsłowych są analizowane razem. Wszystkie użyte ćwiki papierowe włóż do jednej próbki.

2B. PRÓBKA ZLOKALIZOWANA

Pojedyncze analizy próbek pobranych z maksymalnie 4 różnych kieszonek dziąsłowych. Każdy ćwik papierowy trafia do osobnej próbki.

www.iai-test.de/zlecenie

ZLECENIE ONLINE

- ▶ Proces cyfrowy
- ▶ Wybór analiz kontrolnych
- ▶ Dane kliniczne na raporcie z badań
- ▶ Kopia zlecenia wysyłana e-mailem

ZAWARTOŚĆ:

formularz zlecenia | zestaw ćwików papierowych | 4 próbki | plomba zabezpieczająca | instrukcja