

MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ DU PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS

Le mode d'emploi détaillé
est disponible sur
www.iai-test.de.

AVANT LE PRÉLÈVEMENT :

- ▶ Éliminez la plaque dentaire supra-gingivale et laissez sécher le site de prélèvement (pas de nettoyage professionnel).
- ▶ Notez que d'importants saignements et/ou l'évacuation de pus peuvent altérer le résultat de l'analyse.
- ▶ L'utilisation de bains de bouche antibactériens directement avant le prélèvement doit être évitée.

CONTENU :

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1 × formulaire de commande | 1 × formulaire de commande |
| 1 × tube | 1 × tube |
| 1 × set de pointes de papier | |



1. Commande

Remplissez tous les champs du formulaire de commande de façon lisible avec un stylo. Veuillez noter le numéro du test de la commande dans vos documents.



2. Préparation

Prenez les pointes de papier et choisissez le site de prélèvement pour l'échantillon. Le prélèvement doit être réalisé avec exactement 2 pointes de papier à partir de la poche la plus profonde du parodonte.*

*Remarque : analyse possible seulement si exactement 2 pointes de papier sont envoyées.



3. Prélèvement d'échantillons

À l'aide d'une pincette stérile, introduisez respectivement 2 pointes de papier jusque dans le fond de la poche parodontale, laissez-les pendant 10 à 15 secondes puis placez-les dans le tube fourni.



4. Récapitulatif

Notez le site de prélèvement et les informations cliniques sur le formulaire de commande.



5. Envoi

Envoyez les échantillons et le formulaire de commande dans le kit de prélèvement PadoBiom® franc de port et recevez le résultat en ligne (après enregistrement) et par la poste (si vous le souhaitez).