

SKRÓCONA INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBK


Szczegółowa instrukcja
użytkowania
dostępna na
www.iai-test.de.

PRZED POBRANIEM PRÓBK:

- ▶ Usunąć nadziąsłową płytkę nazębną i osuszyć miejsce pobrania.
(nie wykonywać profesjonalnego czyszczenia zębów)
- ▶ Prosimy pamiętać, że silne krwawienie i/lub wydzielina ropna mogą zafałszować wynik analizy.
- ▶ Należy unikać stosowania antybakteryjnych płukanek do jamy ustnej bezpośrednio przed pobraniem próbki.

ZAWARTOŚĆ

1 × formularz zlecenia	1 × plomba zabezpieczająca
1 × probówka	1 × skrócona instrukcja
1 × zestaw ćwieków papierowych	

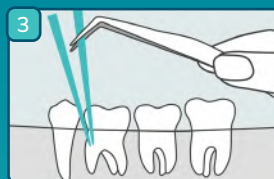

1. Zlecenie

Wypełnij wszystkie pola formularza zlecenia czytelnie, długopisem. Zanotuj numer testu w swojej dokumentacji.

2. Przygotowanie

Weź papierowe końcówki i wybierz miejsce pobrania próbki. Pobrania należy dokonać **dwoma (2) papierowymi końcówkami z najgłębszej kieszonki przyzębnej**.*

* Uwaga: Analiza jest możliwa wyłącznie po przesłaniu dokładnie dwóch (2) papierowych końcówek.

3. Pobranie próbki

Ja pomocą sterylnej pęsety wprowadź po dwie (2) papierowe końcówki do kieszonki przyzębnej aż do jej dna, pozostaw na 10–15 sekund, a następnie umieść w dołączonej probówce.

4. Podsumowanie

Odnótuj miejsce pobrania próbki oraz dane kliniczne w formularzu zlecenia.

5. Wysłka

Przesyłka PadoBiom® jest opłacona. Wyślij próbki z dokładnie wypełnionym formularzem, a wynik otrzymasz online i/lub pocztą.