

# INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBK

www.iai-test.de



Rev.2\_V2025-05

## PRZED POBRANIEM PRÓBK:

- ▶ Usunąć nadziąsłową płytkę nazębną i osuszyć miejsce pobrania. (nie wykonywać profesjonalnego czyszczenia zębów)

### Prosimy zwrócić uwagę:

- ▶ Silne krwawienie i/lub wydzielina ropna, a także pobranie próbki bezpośrednio po leczeniu przyzębia mogą zafałszować wynik analizy.
- ▶ Poddziąsłowa mikroflora potrzebuje co najmniej 6 tygodni, aby ustabilizować się po zakończeniu antybiotykoterapii.
- ▶ Stosowanie antibakteryjnych płukanek do jamy ustnej bezpośrednio przed pobraniem próbki może prowadzić do zafałszowania wyniku analizy.

## ZLECENIE ONLINE


- ▶ Proces cyfrowy
- ▶ Kopia zlecenia wysyłana e-mailem

[www.iai-test.de/zlecenie](http://www.iai-test.de/zlecenie)



### 1. Przygotowanie

Weź papierowe końcówki i wybierz miejsce pobrania próbki. Pobrania należy dokonać **dwoma (2) papierowymi końcówkami z najgłębszej kieszonki przyzębnej**.\*

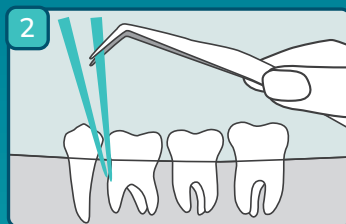


### 2. Pobranie próbki

Ja pomocą sterylnej pęsety wprowadź po dwie (2) papierowe końcówki do kieszonki przyzębnej aż do jej dna, pozostaw na 10–15 sekund, a następnie umieść w dołączonej probówce.



### 3. Zlecenie

Formularz zlecenia można wypełnić online; wersja papierowa jest opcjonalna. Zanotuj numer testu w dokumentacji. Wskazówka: Zrób zdjęcie etykiety z numerem serii znajdującej się na tylnej stronie pudełka testowego.

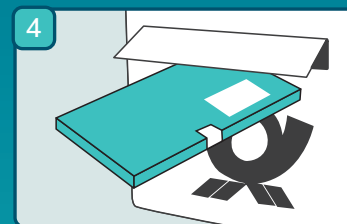

### 4. Wysyłka

Wyślij próbkę oraz (jeśli dotyczy) formularz zlecenia w zestawie do pobierania próbek **PadoBiom®** bezpłatnie. Wynik można otrzymać online i/lub pocztą tradycyjną/e-mailem.

**\*Uwaga: Analiza jest możliwa wyłącznie po przestaniu dokładnie dwóch (2) papierowych końcówek.**

## ZAWARTOŚĆ

formularz zlecenia | probówka | zestaw ćwieków papierowych | plomba zabezpieczająca | instrukcja

PadoBiom®