



KURZANLEITUNG ZUR PROBENGEWINNUNG

www.iai-test.de 

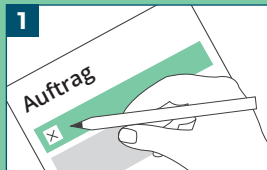

1. AUFTRAG

Füllen Sie alle Formulare gut lesbar mit einem Kugelschreiber aus.
Testnummer des Formulars in Ihren Unterlagen notieren.

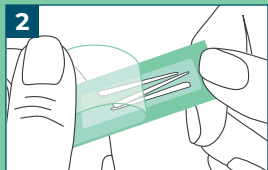

2. VORBEREITUNG

Nehmen Sie die Papierspitzen zur Hand und wählen Sie die Entnahmestelle(n) für die Proben.


2a. Multistellen-Test

Proben von mehreren Zahnfleischtaschen werden in einer Analyse zusammengefasst. Einfach alle benutzten Papierspitzen in ein Röhrchen geben.

2b. Einzelstellen-Test

Separate Analysen von bis zu vier verschiedenen Zahnfleischtaschen.
Jede Papierspitze kommt in ein gesondertes Röhrchen.

Vor Probenentnahme: Entfernung der supragingivalen Plaque und Trockenlegung der Entnahmestelle.

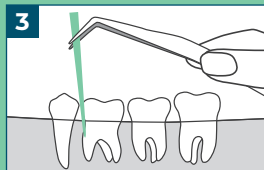

3. PROBENNAHME

Papierspitze jeweils mittels steriler Pinzette in die Zahnfleischtasche bis zum Taschengrund einführen und 10-15 Sekunden dort belassen.



4. ZUSAMMENFASSUNG

Probenentnahmestelle & Taschentiefe zum jeweiligen Röhrchen auf dem Auftragsformular notieren.



5. VERSAND

Proben und Dokumente in der **PadoTest®** Testbox portofrei einsenden und das Ergebnis online und/oder per Briefpost erhalten.

INHALT

1 × Auftragsformular, 1 × Set Papierspitzen,
4 × Röhrchen, 1 × Sicherheitssiegel,
1 × Anleitung

PadoTest®
PadoSero PadoGen