


MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ DU PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS

www.iai-test.de 



1. COMMANDE

Remplissez le formulaire de manière lisible avec un stylo. Notez soigneusement le numéro de test du formulaire dans vos dossiers.

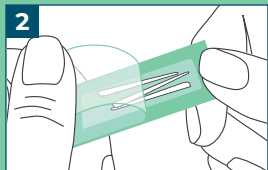

2. PRÉPARATION

Prenez les pointes de papier fournies et choisissez la/les poche(s) dentaire(s) pour le prélèvement d'échantillons.


2a. Pool d'échantillons

Plusieurs échantillons de poches parodontales sont analysés simultanément. Placez simplement toutes les pointes de papier utilisées dans un seul tube.

2b. Test d'échantillons séparés

Analyse séparée d'1 à 4 poches parodontales. Chaque pointe de papier est insérée dans un tube séparé.

Avant le prélèvement : enlèvement de la plaque supragingivale et séchage de la poche respective (pas de nettoyage professionnel des dents).

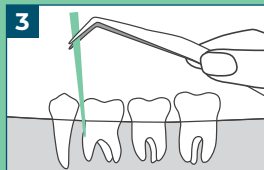

3. ÉCHANTILLONNAGE

Insérez chaque pointe de papier avec des pinces stériles jusqu'au fond de la poche parodontale et attendez pendant 10-15 secondes.



4. RÉCAPITULATIF

Notez le site de prélèvement et la profondeur de poche du tube correspondant sur le formulaire.



5. ENVOI POSTAL

Envoyez gratuitement les échantillons et formulaires associés dans la boîte du kit de test **PadoTest®** et recevez le résultat en ligne et par courrier.

CONTENU

1 × formulaire de commande, 1 × set de pointes de papier,
4 × tubes, 1 × étiquette de sécurité,
1 × mode d'emploi simplifié

PadoTest®
PadoSero PadoGen