


KRÓTKA INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBK

www.iai-test.de



1. ZLECENIE

Wypełnij wszystkie formularze czytelnie długopisem.
Zanotuj numer testu z formularza w swoich dokumentach.

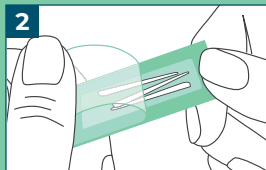

2. PRZYGOTOWANIE

Weź papierowe końcówki i wybierz miejsce/miejsca pobrania próbek.

2a. Test wielomiejscowy


Próbki z kilku kieszonek dziąsłowych są analizowane razem.
Wszystkie użyte papierowe końcówki włóż do jednej próbki.

2b. Test pojedynczego miejsca

Osobne analizy do czterech różnych kieszonek dziąsłowych.
Każda papierowa końcówka trafia do osobnej próbki.


Przed pobraniem próbek:

usuń płytkę naddziąsłową i osusz miejsce pobrania.

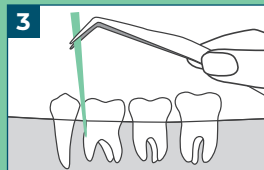

3. POBIERANIE PRÓBK

Papierową końcówkę za pomocą sterylnej pincety wprowadź do kieszonki dziąsłowej aż do dna i pozostaw na 10-15 sekund.

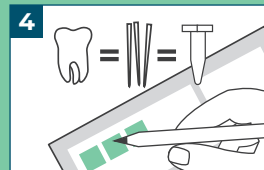

4. PODSUMOWANIE

Miejsce pobrania próbki i głębokość kieszonki przypisz do odpowiedniej próbki na formularzu zlecenia.



5. WYSYŁKA

Próbki i dokumenty wyślij bezpłatnie w pudełku testowym **PadoTest®**.
Wynik otrzymasz online i/lub pocztą tradycyjną.

ZAWARTOŚĆ

1 x formularz zlecenia, 1 x zestaw papierowych końcówek,
4 x próbki, 1 x plomba zabezpieczająca,
1 x instrukcja

PadoTest®
PadoSero PadoGen