



KRÓTKA INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBK

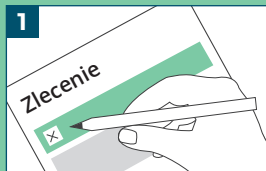

1. ZLECENIE

Wypełnij czytelnie formularz.
Zanotuj numer testu z formularza w swoich dokumentach.

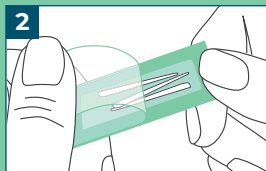

2. PRZYGOTOWANIE

Przygotuj ćwieki papierowe i wybierz miejsce/miejsca pobrania próbek.

2a. Próbką zbiorczą


Próbki z kilku kieszonek dziąsłowych są analizowane razem.
Wszystkie użyte ćwieki papierowe włóż do jednej próbki.

2b. Próbką zlokalizowaną

Pojedyncze analizy z 4 różnych kieszonek dziąsłowych. Każdy ćwiek papierowy trafia do osobnej próbki.


Przed pobraniem próbek:

usuń płytkę naddziąsłową i osusz miejsce pobrania.

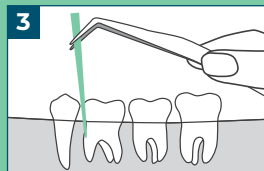

3. POBIERANIE PRÓBK

Za pomocą pęsety wprowadź sterylny ćwiek papierowy do dna kieszonki dziąsłowej i pozostaw na około 10-15 sekund.

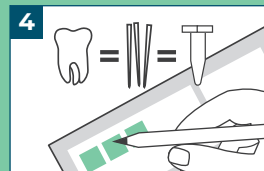

4. PODSUMOWANIE

Miejsce pobrania próbki i głębokość kieszonki przypisz do odpowiedniej próbki na formularzu zlecenia.

5. WYSYŁKA

Przesyłka **PadoTest®** jest opłacona. Wyślij próbki z dokładnie wypełnionym formularzem, a wynik otrzymasz online i/lub pocztą.

ZAWARTOŚĆ

1 x formularz zlecenia, 1 x zestaw ćwieków papierowych,
4 x próbki, 1 x plomba zabezpieczająca,
1 x instrukcja

