

## KURZ- ANLEITUNG ZUR PROBEN- GEWINNUNG

Ausführliche  
Gebrauchsanweisung  
unter [www.iai-test.de](http://www.iai-test.de)  
erhältlich.

### VOR DER PROBENAHEME:

- ▶ Entfernung der supragingivalen Plaque und Trockenlegung der Entnahmestelle (keine professionelle Zahnreinigung).
- ▶ Bitte beachten Sie, dass starke Blutungen und/oder Pusentleerung das Analyseergebnis verfälschen können.
- ▶ Die Verwendung antibakterieller Mundspüllösungen unmittelbar vor der Probenahme sollte vermieden werden.

### INHALT:

1 × Auftragsformular  
1 × Röhrchen  
1 × Set Papierspitzen

1 × Sicherheitssiegel  
1 × Kurzanleitung



#### 1. Auftrag


Füllen Sie alle Felder des Auftragsformulars gut lesbar mit einem Kugelschreiber aus. Bitte Testnummer des Auftrags in Ihren Unterlagen notieren.



#### 2. Vorbereitung

Nehmen Sie die Papierspitzen zur Hand und wählen Sie die Entnahmestelle für die Probe. Die Entnahme muss grundsätzlich mit **genau 2 Papierspitzen aus der tiefsten Tasche** des Parodonts erfolgen.\*

\*Hinweis: Analyse nur bei Einsendung von **genau 2 Papierspitzen** möglich.

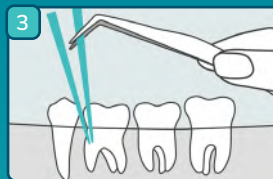

#### 3. Probenentnahme

Jeweils 2 Papierspitzen mittels steriler Pinzette in die Zahnfleischtasche bis zum Taschengrund einführen, 10-15 Sekunden dort belassen und in das mitgelieferte Röhrchen überführen.



#### 4. Zusammenfassung

Probenentnahmestelle & klinische Angaben auf dem Auftragsformular notieren.



#### 5. Versand

Probe und Auftragsformular im PadoBiom® Probenahme-Set portofrei einsenden und das Ergebnis online (nach Registrierung) sowie per Briefpost (wenn gewünscht) erhalten.