

GUIDA RAPIDA AL PRELIEVO DEI CAMPIONI

Le istruzioni per l'uso
dettagliate sono
disponibili sul sito
www.iai-test.de.

PRIMA DEL PRELIEVO:

- ▶ Rimuovere la placca sopragengivale e isolare il sito del prelievo (non effettuare una pulizia dentale professionale).
- ▶ Notare che i sanguinamenti intensi e/o le fuoriuscite di pus possono falsificare il risultato dell'analisi.
- ▶ Evitare l'uso di collutori antibatterici immediatamente prima del prelievo dei campioni.

CONTENUTO:

1 modulo d'ordine
1 provetta
1 set di coni di carta

1 sigillo di sicurezza
1 guida rapida



1. Ordine


Compilare tutti i campi del modulo d'ordine, in modo leggibile, con una penna a sfera. Annotare il numero di test dell'ordine nella propria documentazione.



2. Preparazione


Prendere i coni di carta e stabilire il sito di prelievo dei campioni. Il prelievo deve sempre essere effettuato con **esattamente 2 coni di carta dalla tasca parodontale più profonda**.*

***Nota:** l'analisi potrà essere effettuata soltanto se vengono inviati esattamente 2 coni di carta.

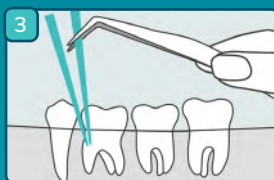

3. Prelievo dei campioni

Con una pinzetta sterile, introdurre 2 coni di carta nella tasca gengivale fino al fondo della tasca, lasciarli in sede per 10-15 secondi e trasferirli nella provetta fornita in dotazione.

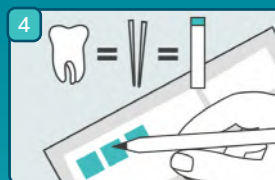

4. Riepilogo

Annotare il sito di prelievo dei campioni e le informazioni cliniche sul modulo d'ordine.

5. Spedizione

Inviare gratuitamente il campione e il modulo d'ordine nel kit di prelievo **PadoBiom®** per ricevere il risultato online (dopo la registrazione) e per posta (opzionale).

