



GUIDA RAPIDA AL PRELIEVO DEI CAMPIONI

www.iai-test.de

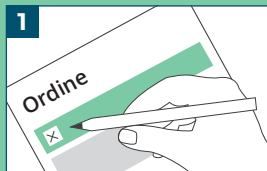

1. ORDINE

Compili tutti i moduli in modo leggibile con una matita. Annoti il numero del test del modulo e lo conservi nei Suoi documenti.

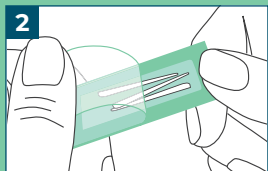

2. PREPARAZIONE

Prenda i coni di carta sterili e scelga il punto / i punti da cui prelevare il campione / i campioni.


2a. Test multi-site

Campioni prelevati da varie tasche gengivali come parte di una stessa analisi. In questo caso inserire tutte le punte di carta usate in una sola provetta.

2b. Test single-site


Analisi separate di un massimo di 4 tasche gengivali diverse. In questo caso inserire un solo cono di carta per ogni tasca gengivale in una singola provetta.

Prima del prelievo dei campioni: rimozione della placca sopragengivale e drenaggio del punto da cui si vuole prelevare un campione (senza effettuare la detartrasi).

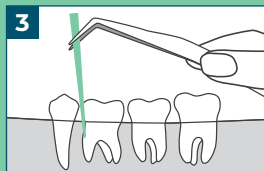

3. PRELIEVO DEI CAMPIONI

Inserire un cono di carta con una pinzetta sterile nella tasca gengivale fino a raggiungere il fondo del solco gengivale, dove resta per 10–15 secondi.

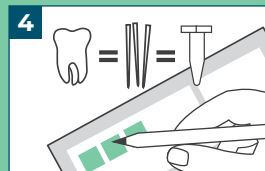

4. RIEPILOGO

Annoti sul modulo dell'ordine i punti da cui ha effettuato i prelievi dei campioni e la profondità delle tasche gengivali dei singoli punti di prelievo per ogni singola provetta.



5. SPEDIZIONE

Inserire i campioni ed i documenti nella confezione di **PadoTest®**, spedirla al laboratorio a carico del destinatario e visualizzare l'esito del test online oppure riceverlo per posta.

CONTENUTO

1 × modulo d'ordine, 1 × set di coni di carta,
4 × provette, 1 × sigillo di sicurezza,
1 × guida rapida

PadoTest®
PadoSero PadoGen